



LP — 20

# HYGIENE

AUSTRIA

## Atemschutzmaske, FFP2

1. Eigen- und Fremdschutz
2. Guter Tragekomfort
3. Hohe Atmungsaktivität aufgrund hochwertiger Vliesmaterialien



1. Reinigen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel.



2. Legen Sie um jedes Ohr eine Schlaufe der Maske.



3. Ziehen Sie das obere und untere Ende über Nase und Kinn, damit zwischen dem Gesicht und der Maske keine Lücken entstehen.



4. Drücken Sie den Nasenbügel fest an Nase und Wangen.



5. Vermeiden Sie das Berühren der Maske während Sie sie tragen.

# Spezifikationen Maske

Hersteller	- Hygiene Austria LP GmbH
Modell	- Atemschutzmaske, FFP2
Typ	- HA PP02
Kategorie	- PSA-Kategorie III
Geräteklasse	- FFP2 NR
Menge / Verpackungseinheit	- 1 Stk., 2 Stk., 20 Stk., 40 Stk., 350 Stk., 400 Stk. (in diversen Verpackungstypen)
Farbe	- Weiß
Gebrauchshinweise und Haltbarkeit	- Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen - Mindesthaltbarkeit: Siehe Maske - Nicht wiederverwendbar - Es wird empfohlen die Atemschutzmaske alle 4 Stunden oder bei Durchfeuchtung abzusetzen und zu wechseln
Lagerbedingungen	- Nicht unter -20°C oder über 40°C und an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern - Unter 80% Luftfeuchtigkeit lagern
Größe Maske	- 16 x 11 cm in gefaltetem Zustand (Geringe Abweichungen möglich)
Gewicht (pro Maske)	- ca. 5,3 g (Geringe Abweichungen möglich)
Zertifizierung	- Konformitätserklärung (EU 2016/425) - EN 149:2001+A1:2009 - Oekotex 100
Produktspezifikationen	- Verwendung eines mehrlagigen Vlieses (PP) - extra starker und flexibler Nasenclip