

WiBUplus Desinfektionstücher

Vorgetränkte, gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher zur schnellen Desinfektion

- VAH-gelistet
- Wirkungsbereich A
- Alkoholfrei



Eigenschaften

Alkoholfreies, vorgetränktes, gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionstuch. Aldehyd- und phenolfrei. Bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2 und Noro). Mit angenehmem Geruch.

Anwendungsbereich

Zur schnellen Desinfektion und Reinigung im Wischverfahren von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendungshinweise

Oberflächen sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung und Einwirkzeit achten! Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. nachwischen. Nach Gebrauch die Tücher der Abfallentsorgung zuführen. Das Tragen von Handschuhen beim Umgang mit Desinfektionsmitteln wird empfohlen. Nicht zur Hautreinigung verwenden!

Einwirkzeiten

Einwirkzeit	Dosierung	Bemerkung
60 Sek.	Unverdünnt	Bakterizid, levurozid EN 1276, EN13697, EN1650, EN13727, EN 13624
5 Min.	Unverdünnt	Bakterizid, levurozid (VAH) niedrige Be- lastung/ Mechanik
60 Sek.	Unverdünnt	Behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grippe) RKI/ DVV
30 Min.	Unverdünnt	Norovirus (MNV) EN 14476
60 Sek.	Unverdünnt	Rotavirus EN 14476
5 Min.	Unverdünnt	Polyomavirus SV40 RKI/ DVV

Lieferformen / Artikelnummer

Packung mit 48 Tüchern,
18 x 20 cm

803407

Inhaltsstoffe

In 100 g Flüssigkeit sind enthalten:
0,25 g Dialkyldimethylammoniumchlorid,
0,25 g Benzalkoniumchlorid,
0,25 g Alkyldimethyl(enthylbenzyl)ammonium-
chlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

Verwendbarkeit

Die Tücher sind bei vollständig geöffnetem Pop-up Deckel 28 Tage, bei sorgfältig wiederverschlossener Verpackung nach Produktentnahme 3 Monate haltbar.

Verwendbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum. (Auf der Verpackung aufgedruckt).

Hinweise

Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Es besitzt aufgrund seiner Zusammensetzung keine erkennbaren Arbeitsrisiken. Berufskrankheiten oder Allergien sind beim Umgang mit diesem Produkt ursächlich nicht festgestellt worden.

Hersteller

NW-Chemie GmbH, Langbaughstraße 15, D-53842 Troisdorf, Germany. Tel. +49 2241 3923-0

Die Angaben zu unseren Produkten entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Produktinformationsblatts und dienen in Anbetracht wechselnder Verhältnisse nur als Anhalt.

Stand: 05 / 2021